


## VEQTAの遺伝子疾患検査について（血液検査）

血液検査をご希望の場合は、お申込み時にお申し出ください。  
お申込み完了後、必ずかかりつけの獣医師に採血を依頼してください。

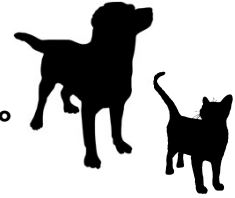

### 血液採取時期について

- ◆ 生後間もない子犬・子猫も検査可能です。
- ◆ 妊娠中は子のDNAが混入する可能性があるため、検査できません。

### 血液採取について

- ◆ 検体容器の種類：EDTA採血管
- ◆ 採血方法：1cc以上の全血をEDTA採血管に注入し、直ちにゆっくり5、6回転倒混和してください。（血液は溶血していても解析可能）
- ◆ 血液検体の保存方法：冷蔵

### 送付方法について

- ◆ 送付物：①血液検体  
②申込書（申込書は弊社HPよりダウンロードのうえ、ご記入ください。）
- ◆ 冷蔵便で以下住所に送付いただくよう、動物病院様に依頼してください。

〒660-0083  
尼崎市道意町7-1-3  
尼崎リサーチ・インキュベーションセンター 304  
株式会社クオルテック内 VEQTA遺伝子検査ラボ 行

- ※送料はお客様負担でお願いしております。
- ※弊社営業日（平日）に到着するようご調整よろしく願いいたします。