

VEQTAの遺伝性疾患検査について（血液検査用）

この度は愛犬・愛猫の遺伝性疾患 DNA検査サービスにお申し込み頂き、誠にありがとうございます。
免責事項および分析にかかる規約をよくお読みいただき、愛犬・愛猫の血液の採取をよろしくお願
いいたします。

血液検査をご希望の場合は、ご注文時にお申し出ください。
申込完了後、必ずかかりつけの獣医師に採血を依頼してください。



血液採取時期について

- ◆ 生後間もない子犬・子猫も検査可能です。
- ◆ 妊娠中は子のDNAが混入する可能性があるため、検査できません。

血液採取について

- ◆ 検体容器の種類：EDTA採血管
- ◆ 採血方法：1cc以上の全血をEDTA採血管に注入し、直ちにゆっくり5、6回転倒混和してください。（血液は溶血していても解析可能）
- ◆ 血液検体の保存方法：冷蔵

送付方法について

- ◆ 動物病院様に冷蔵便で下記住所に送付いただいでください。

〒660-0083
尼崎市道意町7-1-3
尼崎リサーチ・インキュベーションセンター 304
株式会社クオルテック内 VEQTA遺伝子検査ラボ 行

- ※送料はお客様負担でお願いしております。
- ※弊社営業日（平日）に到着するようご調整よろしくお願
いいたします。



<http://www.veqta.jp>