

# Veqtaの遺伝性疾患検査について

この度は愛犬・愛猫の遺伝性疾患 DNA検査サービスにお申し込み頂き、誠にありがとうございます。  
下記の取扱説明書と裏面の免責事項及び規約をよくお読みいただき、愛犬・愛猫の口腔粘膜の採取をよろしくお願いたします。

## 送付内容

①DNA採取用キット	1頭につき	1本
②お申込み用紙	1頭につき	1部
③返信用封筒		1部

### 【注】

DNAの採取は必ず、キット1本につき一頭ずつ採取し、筒に名前のみを記入。  
お申込み用紙も一枚につき一頭ずつ記入。



## DNA採取キット取扱説明

1


筒のラベルに犬名・猫名を記入します。  
赤色のキャップを外し、DNA採取用キットを取り出します。採取部分を、素手で触れないようにしてください。



2

キットを口の中の頬や唇の裏側に20回ほど上下、前後に動かし、十分にこすりつけて粘膜を取ります。  
生後半年未満の子犬・子猫は、まれにDNAの量が不足する場合がございますので、強めにこすり付けてください。

※母親のDNAの混入を防ぐために  
離乳後の検査を推奨します。

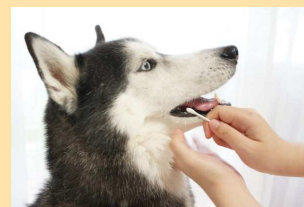

3

キットを筒に戻し、キャップが閉まっていることを確認して下さい。  
添付の返信用封筒にキットとお申込み用紙を同封し、速やかにご返送ください。



<http://www.veqta.jp>